

Asegure la grúa con nuestra amplia gama de accesorios de elevación.



Los arneses Liko™, la sábana de movilización RepoSheet™, HandySheet™ y otros accesorios inteligentes.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Diseño centrado en la seguridad, funcionalidad y comodidad.

Nuestros arneses son conocidos por su alta calidad. En treinta años, en estrecha colaboración con los usuarios y pacientes, hemos desarrollado accesorios de elevación prácticos y fáciles de usar, siempre centrándonos en la seguridad, funcionalidad y comodidad.

Documentación de primera línea.

En cada arnés se incluye las **guía de instrucciones** que describe las aplicaciones de los arneses. Aquí, las directrices le ayudarán para determinar que percha es la más adecuada.

Hay disponible **una guía rápida** para todos los modelos básicos. Estas breves instrucciones contienen la información más importante sobre la aplicación y cuidado del arnés. **El protocolo de adecuación** facilita el uso correcto ya que permite al cuidador decidir el modelo correcto para un paciente específico.

Para facilitar la inspección periódica, hay disponible **un protocolo de inspección periódica**. Este describe minuciosamente qué puntos críticos necesitan revisarse.

Sabías...

... que escoger el material correcto es un eslabón importante en la cadena a la hora de seleccionar un arnés. Nuestros arneses están fabricados con distintos materiales, cada uno de ellos con características y ventajas especiales. La elección más habitual es el **tejido de poliéster verde**, que es óptimo en lo referente a resistencia al desgaste y durabilidad. Para las situaciones de baño y ducha, se recomienda un arnés de **red recubierta de plástico**, ya que seca rápido. Cuando el arnés va a permanecer puesto, es preferible la red de poliéster, disponible en dos calidades de gris y una de verde. Nuestro material Solo... para arneses desechables es único y está fabricado de un **material no tejido** muy resistente. Muchas de las tallas más pequeñas de nuestros arneses están diseñados para niños. Por este motivo, están fabricados con un **tejido de poliéster con diseños de ositos**.

Nuestros accesorios de elevación están aprobados para una carga máxima de 440 libras a menos que se especifique otra cosa.

Probado y aprobado.

Un instituto de pruebas acreditado ha testado los arneses de Liko™ y cumplen con todos los requisitos para los productos de Clase I MDD. También cumplen con todos los requisitos según las normas armonizadas EN ISO 10535-2006.

Nuestros accesorios de elevación están aprobados para una carga máxima de 440 libras a menos que se especifique otra cosa, pero también tenemos arneses con una carga máxima de 1100 libras en nuestra amplia gama de arneses.

! No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.



1. Etiqueta del producto que indica claramente el modelo, tamaño y diseño del arnés. Aquí, también se encontrarán consejos de lavado y la carga máxima del arnés.

2. Etiqueta de identificación del paciente, cosida al arnés. Se facilita espacio para cinco nombres distintos.

3. Etiqueta de inspección periódica para identificar las fechas de inspección. Simplemente haga un agujero en el cuadrado apropiado para marcar el mes y año actual. Esto proporciona una marca duradera que no desaparece durante el lavado.

4. Costuras reforzadas (remates) probadas exhaustivamente y cintas reforzadas para optimizar la resistencia y seguridad. La costura reforzada, testada para la carga, se coloca donde se produce el aumento de la carga. La colocación de la costura se ha determinado a través de cuidadosas pruebas.

5. Marcas de tamaño en diferentes colores. En la mayoría de los modelos de arnés esta marca de color está colocada como una cinta central trasera que también facilita la colocación correcta del arnés al paciente.

6. Los arneses están disponibles en muchos **materiales cuidadosamente seleccionados** para trabajar óptimamente en diferentes áreas de aplicación.

7. Los soportes para las piernas en los diferentes diseños, están fabricados solo en tejido, acolchado y reforzado, para cumplir las diferentes necesidades. El soporte para las piernas amplio proporciona un área de soporte mayor para una máxima comodidad y un alivio de la presión.

8. Los bordes cosidos en una sola pieza, con pocas uniones para asegurar una fuerza máxima, dado que las costuras es la parte más débil.

Nuestros modelos de arneses están **diseñados cuidadosamente** para asegurar que el paciente sentado tenga bien distribuida la presión entre piernas y espalda para un buen soporte durante la transferencia. Esto permite una postura de sentado óptima, para que el paciente acabe en el lugar correcto durante la transferencia.

Modelos básicos de Liko™: Los usados más comúnmente

Arneses para cumplir las necesidades del paciente.

Durante muchos años nos hemos adherido al lema **“El arnés es la mitad de la grúa”**. El arnés es el factor que determina cómo de bien que funciona la grúa, es la unión entre la grúa y el paciente. Todos los modelos de arnés tienen características únicas para cumplir una gama amplia de las necesidades de elevación. Algunos modelos de arnés se denominan modelos básicos porque cubren unas necesidades amplias de elevación de distintos pacientes. Se utilizan para situaciones comunes de elevación, como por ejemplo elevar desde/hacia cama/camilla/silla/silla de ruedas. Algunos pueden incluso utilizarse para la elevación desde el suelo.

Sabías...

... que ninguna grúa es igual a otra. Es exactamente por esta razón por la que tenemos una de las **gammas más amplias de accesorios de elevación**. Cada uno de nuestros modelos de arnés tiene unas características únicas para cumplir las necesidades específicas de elevación. Con nuestro rango de arneses y accesorios podemos trabajar tanto con las grúas de tratamientos **más comunes como a los casos especiales más demandados**. Estas consideraciones son las que nos han guiado en nuestro trabajo de **desarrollo durante más de 30 años**. Nos aventuramos a decir que sabemos lo que funciona.



Modelos básicos de Liko™: Los usados más comúnmente



ARNÉS LIKO™ UNIVERSAL™, MOD. 000, 002

Un modelo básico que se adapta a casi todos los pacientes. El arnés universal es excelente para pacientes ancianos con movilidad limitada. Permite una posición de sentado erguida con apoyo en toda la espalda. Mod. 002: es una versión que proporciona una altura de elevación adicional. Un arnés excelente para comenzar.

- Excelente modelo básico, se adapta a la mayoría de pacientes
- Proporciona soporte a toda la espalda
- Los brazos del paciente quedan por dentro del arnés.
- Proporciona una posición de sentado erguida (000)
- Mod. 002 proporciona una altura de elevación adicional

TAMAÑOS: S, MS, M, L, XL*

TEJIDOS: Poliéster, red de poliéster, red recubierta de plástico.



ARNÉS LIKO SOFT ORIGINAL ALTO™ DE LIKO™, MOD. 26 EL MÁS VENDIDO

Arnés Liko Soft Original Alto™ de Liko™ posee un desarrollado ajuste y comodidad con un apoyo de la cabeza práctico en la posición de sentado. Permite una postura de sentado reclinada con apoyo para la cabeza y, por lo tanto, es adecuado para pacientes con poca estabilidad en la cabeza y tronco. El arnés Liko Soft Original Alto™ es adecuado para elevaciones hacia y desde el suelo.

- Se adapta a la mayoría de los pacientes
- La mejor opción para realizar transferencias desde una posición de horizontal (reposo)
- Ajuste optimizado y cómodo
- Proporciona un soporte cómodo añadido para la cabeza
- Cómoda posición de sentado reclinada

TAMAÑOS: XS, S, MS, M, L, XL, XXL*

TEJIDOS: Poliéster, poliéster con diseños de ositos (para niños)



ARNÉS LIKO ORIGINAL ALTO™ DE LIKO™, MOD. 20

El arnés Liko Original Alto™ de Liko™ permite una postura de sentado reclinada con apoyo para la cabeza y, por lo tanto, es adecuado para pacientes con poca estabilidad en la cabeza y tronco. Es muy adecuado para elevaciones hacia y desde suelo.

- Se adapta a la mayoría de los pacientes
- Una excelente opción para elevar desde una posición horizontal
- Proporciona un buen soporte para la cabeza y columna
- Cómoda posición de sentado reclinada

TAMAÑOS: XS, S, MS, M, L, XL, XXL*

TEJIDOS: Poliéster en red, red recubierta de plástico, poliéster, poliéster tricotado con motivos de ositos (para niños)



ARNÉS LIKO ORIGINAL™ DE LIKO™, MOD. 10/11

El arnés Liko Original™ de Liko™ tiene un respaldo medio-alto, que permite al paciente sacar uno o los dos brazos fuera del arnés. El arnés se ajusta al usuario, es simple y flexible para trabajar y permite una postura de sentado cómoda. Además, está disponible en una amplia variedad de tamaños y versiones.

- Permite la participación del paciente
- Excelente para las transferencias desde posiciones de sentado o semisentado
- Excelente soporte de columna hasta los omóplatos
- El paciente puede descansar los brazos por dentro o por fuera
- Fácil de colocar

TAMAÑOS: XS, S, MS, M, L, XL*

TEJIDOS: Poliéster, red de poliéster, red recubierta de plástico, poliéster tricotado con motivos de ositos (para niños)



Arneses Liko™ para el aseo y la higiene



Asistencia cuando más lo necesita.

Las elevaciones en conexión con la transferencia al aseo necesitan más rendimiento de un arnés. Nuestros arneses facilitan el vestido y desvestido del paciente durante el proceso de elevación. Estas elevaciones son a menudo percibidas por los cuidadores como difíciles e incómodas. Nuestra gama, con varios modelos diferentes que proporcionan diferentes niveles de apoyo y seguridad, alivian la presión de todos.

Arneses Liko™ para el aseo y la higiene



ARNÉS LIKO DE HIGIENE.. DE LIKO.. MOD. 40, 41 EL MÁS VENDIDO

Un arnés sencillo y fácil de usar que se adapta a la mayoría de los pacientes. Facilita el vestido y desvestido en las transferencias desde y hasta el aseo. El arnés es adecuado para pacientes con cierto grado de estabilidad corporal. El arnés higiene.. mod. 41, está equipado con un cinturón y ha mejorado la forma. El mod. 41 es un arnés excelente para comenzar.

- Para pacientes con buena estabilidad del tronco
- Fácil de colocar
- Facilita el vestido y desvestido durante las transferencias de higiene.
- Los brazos del paciente reposan fuera del arnés
- El mod. 41 está equipado con un cinturón para mayor seguridad

TAMAÑOS: XS, S, M, L, XL*

TEJIDOS: Poliéster, poliéster con diseños de ositos (para niños)



ARNÉS LIKO DE HIGIENE.. DE LIKO.. MOD. 45, 46

El arnés Liko de higiene.. Mod. 45 está equipado con un cinturón de seguridad SafetyBelt.. que eleva la parte superior del cuerpo para una estabilidad extra. Además del cinturón de seguridad SafetyBelt.., Mod. 46 el arnés también está equipado con un soporte extra del respaldo alto.

- Equipado con un cinturón de seguridad SafetyBelt.., ideal para pacientes con escasa estabilidad del tronco
- Facilita el vestido y desvestido durante las transferencias de higiene
- Se puede utilizar con uno de los brazos del paciente por dentro
- El mod. 46 está equipado con un soporte de espalda que proporciona un mayor apoyo, seguridad y comodidad

TAMAÑOS: XS, S, M, L, XL*

TEJIDOS: Poliéster, poliéster con diseños de ositos (para niños)



CHALECO LIKO HIGIENE.. DE LIKO.. MOD. 50, 55

El chaleco higiene es un arnés único especialmente diseñado para elevar pacientes con bajo tono muscular de forma segura hacia el aseo. El chaleco higiene permite una posición de sentado más erguida, con un soporte firme en la parte superior del cuerpo. Simultáneamente, deja una gran parte de la zona baja del paciente libre para vestir y desvestir. El chaleco higiene mod. 55 está equipado con soporte de cabeza.

El mod. 50:

- Apropiado para pacientes con un tono alto/bajo y espasticidad
- Facilita el vestido y desvestido durante las transferencias de higiene
- Soporta y eleva la parte superior del cuerpo
- Gran seguridad para transferencias por higiene
- Posición de sentado erguida

TAMAÑOS: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL *

TEJIDOS: Poliéster, poliéster con diseños de ositos (para niños)

El mod. 55:

- Excelente para pacientes con espasticidad
- Facilita el vestido y desvestido durante las transferencias de higiene
- Proporciona un buen soporte para la cabeza y columna
- Gran seguridad para transferencias por higiene
- Soporta y eleva la parte superior del cuerpo

TAMAÑOS: XXS, XS, S, M, L, XL

TEJIDOS: Poliéster, poliéster con diseños de ositos (para niños)



Arneses Liko™ para necesidades especiales

Todas las necesidades son especiales, pero unas más que otras.

Nuestra línea de producto incluye modelos de arnés que están más especializados en facilitar un uso óptimo en un área de aplicación específica. Entre los ejemplos se incluye elevar a pacientes con amputaciones o bariátricos. Para cumplir las necesidades para los arneses de uso a corto plazo por un único paciente, y como manera de evitar tener que lavar, hemos desarrollado una serie de arneses desechables. Gracias a nuestra amplia gama, podemos cumplir la mayoría de las necesidades.

Trabajamos continuamente para desarrollar nuevos modelos y mejorar los existentes, lo que quiere decir que podemos ofrecer arneses adaptados a los pacientes con necesidades muy especiales.



ARNÉS LIKO AMPUTADOS.. DE LIKO.. MOD. 70, 75

El arnés Amputados tiene un diseño especial con control extra de la cinta lo que evita que los soportes de la pierna se separen entre ellos. Recomendamos el arnés Amputados a los pacientes con amputaciones altas o femorales dobles de las piernas u otros pacientes que necesiten seguridad extra.

El arnés Amputados está disponible en dos alturas de respaldo, el mod. 70 soporta hasta la altura de los omoplatos, el mod. 75, hasta la cabeza.

- Para pacientes con una amputación única o doble femoral.
- Ideal para pacientes que tienden a escurrirse de otros arneses
- Proporciona un excelente soporte para la cabeza y columna (Mod.75)
- Posición de sentado levemente reclinada

TAMAÑOS: S, M, L, XL *
TEJIDOS: Poliéster, poliéster en red



Arneses Liko™ para necesidades especiales

ARNÉS DESECHABLE ALTO.. DE LIKO.. MOD. 25

Para cumplir las necesidades para los arneses de uso a corto plazo por un único paciente, y como manera de evitar tener que lavar, hemos desarrollado una serie de arneses desechables. El arnés desechable alto.. es adecuado para la mayoría de pacientes y se puede utilizar para traslados comunes.

- Se adapta a la mayoría de los pacientes
- Una excelente opción para elevar desde una posición horizontal
- Proporciona un excelente soporte para la cabeza y columna
- Cómoda posición de sentado reclinada
- Arnés desechable de un solo uso (no lavar)

TAMAÑOS: MS, M, L, XL, XXL*
TEJIDO: Material no tejido



ARNÉS LIKO CONFORT PLUS.. DE LIKO.. MOD. 300, 310

El arnés Liko Confort Plus.. es un desarrollo posterior del arnés confort.. (Mod. 30, 31) que mejora la comodidad y el ajuste. El arnés confort plus.. permite una posición de sentado erguida y un soporte para toda la espalda.

El arnés Confort Plus.. se coloca y se quita con el paciente en posición supina y después del traslado se deja en la silla. El modelo 310 está equipado con una abertura para su higiene.

- Excelente para pacientes con artritis o amputación de la extremidad inferior
- El arnés se deja colocado bajo el paciente
- Modelo de arnés con posibilidad de ángulo abierto de la articulación coxofemoral combinado con una percha simétrica (de 4 puntos)

TAMAÑOS: M, L, XL*
TEJIDOS: Poliéster en red, red recubierta de plástico



ARNÉS LIKO CONFORT PLUS ALTO.. DE LIKO.. MOD. 350, 360

El arnés Liko Confort Plus Alto.. es un desarrollo posterior del arnés confort.. (Mod. 35, 36) que mejora la comodidad y el ajuste. El arnés Liko Confort Plus Alto.. permite una postura de sentado levemente reclinada y un soporte para toda la espalda. Está equipado con un soporte de cabeza suave. El arnés Liko Confort Plus Alto.. se coloca y se quita con el paciente en posición supina y después del traslado se deja en la silla. El modelo 360 está equipado con una abertura para su higiene.

- Excelente para pacientes con artritis o amputación de la extremidad inferior
- El arnés se deja colocado bajo el paciente
- Modelo de arnés con posibilidad de ángulo abierto de la articulación coxofemoral combinado con una percha simétrica (de 4 puntos)
- Proporciona un soporte cómodo añadido para la cabeza

TAMAÑOS: M, L, XL*
TEJIDOS: Poliéster en red, red recubierta de plástico



ARNÉS LIKO SILUETA.. DE LIKO.. MOD. 22

El arnés Silueta.. proporciona una postura de sentado reclinado con cómodo soporte para la cabeza. Está diseñado especialmente para traslados a sillas de ruedas estrechas donde se debe dejar el arnés en la silla. El arnés Silueta.. es delgado y flexible sin manillas o refuerzos.

- Un arnés flexible en poliéster de red para elevar hasta contornos y moldes personalizados
- Excelente para pacientes con malformaciones posturales
- Se puede dejar colocado por debajo del paciente después de una transferencia
- Proporciona un buen soporte para la cabeza y columna
- El paciente puede descansar los brazos por dentro o por fuera

TAMAÑOS: XS, S, M, L
TEJIDO: Poliéster en red





Los pacientes con sobrepeso son más ligeros con las ayudas correctas.

La elevación de pacientes con sobrepeso requiere ayudas y tecnología especiales. Con una carga máxima de hasta 1100 libras el sistema UltraTwin™ de Liko™ puede soportar elevaciones realmente pesadas. Gracias a los dos motores de elevación interconectados, el paciente puede colocarse en posición de sentado, semi reclinado u horizontal. Controlando los dos motores de elevación individuales, la posición se sentado se puede ajustar para mayor comodidad. Liko tiene mucha experiencia trabajando con pacientes con sobrepeso. Durante muchos años, hemos colaborado mano a mano con varios hospitales de primer orden en todo el mundo que se especializan en el cuidado y tratamiento de pacientes bariátricos.



ARNÉS LIKO ULTRA™ LIKO., MOD. 06

Hemos desarrollado la serie de productos ultra para elevar pacientes bariátricos de forma segura y cómoda.

El arnés Ultra™ sostiene toda la espalda hasta los hombros. Con el diseño único, los soportes para las piernas se instalan individualmente en la percha, lo que permite que el abdomen tenga espacio y que las piernas tengan un soporte óptimo. El arnés Ultra™ está disponible en tres tamaños, donde el más largo proporciona también soporte adicional para la parte inferior de las piernas.

- Diseñado para pacientes bariátricos
- Proporciona un espacio extra para el abdomen
- Se puede utilizar junto con el sistema de elevación UltraTwin™ de Liko, el tamaño más corto también puede utilizarse con la percha doble universal TwinBar™ 670
- Carga máxima 1100 libras

TAMAÑOS: Corta, Regular, Larga
TEJIDOS: Poliéster, (poliéster en red)



ARNÉS LIKO SOFT ORIGINAL ALTO™ DE LIKO. MOD. 26

El arnés Liko Soft Original Alto™ ha desarrollado un ajuste y comodidad con un cómodo soporte para la cabeza en la posición de sentado. El arnés Soft Original Alto™ proporciona una postura de sentado reclinada con apoyo para la cabeza y, por lo tanto, es adecuado para pacientes con poca estabilidad en la cabeza y tronco. El arnés Soft Original Alto™ es ideal para elevaciones hacia y desde el suelo. Los tamaños mayores del arnés Soft Original Alto™ pueden utilizarse para mejorar la elevación de pacientes pesados, preferiblemente en combinación con una percha doble universal TwinBar™ 670, una percha cruzada 670, o percha lateral, dependiendo de cuanto espacio necesite el paciente.

- Se adapta a la mayoría de los pacientes
- Ajuste optimizado y cómodo
- Proporciona un soporte cómodo añadido para la cabeza
- Cómoda posición de sentado reclinada
- Carga máxima 1100 libras

TAMAÑOS: Para pacientes con peso entre 440-1100 libras, hay disponibles los tamaños XL, XXL.
TEJIDOS: Poliéster



PANTALONES DE ELEVACIÓN ULTRA LIFTPANTS™. MOD. 920

Lograr que los pacientes de mucho peso puedan ponerse de pie es un paso muy importante para su rehabilitación, por ejemplo, después de una intervención. El único pantalón de elevación Ultra LiftPants™ proporciona un buen apoyo para todo el cuerpo y le da al paciente la confianza necesaria para dar esos primeros pasos.

- Para pacientes que pueden apoyar el peso sobre sus piernas
- Seguro y sin riesgos para elevaciones y ejercicios de bipedestación, movilidad y equilibrio
- Permite un patrón de movimiento natural al realizar elevaciones
- Realiza la presión en la entepierna y en la cinta del lazo a la altura de la cadera
- Accesorios: Cubierta Solo, almohadillado para las cintas de los hombros
- Carga máxima: hasta 1100 libras

TAMAÑOS: XXL, XXXL
TEJIDO: Poliéster en red

Otros accesorios para pacientes con sobrepeso.

HANDYSHEET™ DE LIKO.

Consulte la página 21.

SÁBANA DE MOVILIZACIÓN REPOSHEET™ ORIGINALULTRA DE LIKO™

Consulte la página 22.

CINTA MULTISTRAP™ DE LIKO.

Consulte la página 23.

Arneses pediátricos de Liko™

Arneses pediátricos de Liko™

Arneses seguros para niños.

La elevación de niños no es igual a la de adultos de talla pequeña. Los niños tienen necesidades especiales y por lo tanto necesitan productos que estén especialmente diseñados para cumplir esas necesidades. Tenemos amplia experiencia en esta área y fuimos los primeros en ofrecer accesorios de elevación especialmente adaptados para niños. Trabajamos continuamente para desarrollar tecnología y modelos para nuestros pacientes más jóvenes, y a día de hoy, la mayoría de nuestros modelos de arneses están disponibles en versiones que están especialmente diseñadas para niños. Muchos de nuestros modelos pediátricos están disponibles en tejidos con diseños de ositos para atraer a los más pequeños. Les llamamos “arneses Teddy”



ARNÉS TEDDY ORIGINAL. ARNÉS LIKO ORIGINAL. DE LIKO., MOD. 10

El arnés es adecuado para elevar desde/hacia posiciones de reclinado/semireclinado o desde el suelo si el niño no necesita soporte especial para la cabeza. Sostiene toda la espalda hasta los hombros.

- Cinturón con hebilla de seguridad SafetyBuckle

TAMAÑOS: XS, S

TEJIDOS: Poliéster tricotado con motivos de osito de peluche (niños), poliéster (sólo S), poliéster en red, red recubierta de plástico (sólo S)



ARNÉS TEDDY ORIGINAL SOFT. MOD. 26 ARNÉS LIKO ORIGINAL ALTO. DE LIKO., MOD. 20

Estos modelos permiten una posición sentada relajada y reclinada. Pueden utilizarse para todos los traslados desde y hacia las posiciones sentado y horizontal. Perfecto para los traslados desde y hacia el suelo. Además, el mod. 26 está equipado con una cabecera reforzada y permite lograr una posición de sentado erguida y un soporte excelente para el paciente. Los niños con problemas de espasticidad suelen sentarse bien en el mod. 26.

- Cinturón con hebilla de seguridad SafetyBuckle
- Además el mod. 26 tiene los soportes del respaldo, cabeza y piernas reforzados.

MOD. 20: TAMAÑOS: XS, S TEJIDOS: Poliéster, poliéster en red, red recubierta de plástico

MOD. 26: TAMAÑOS: XS, S TEJIDOS: Poliéster, poliéster con diseños de ositos (para niños)



ARNÉS LIKO SILUETA. DE LIKO., MOD. 22

Hemos desarrollado el arnés Silueta. especialmente para niños que se sientan en asientos moldeados y por lo tanto necesitan un arnés que se pueda dejar en la silla después del traslado. Los brazos se pueden colocar en el interior o el exterior del arnés.

- Se puede dejar colocado en la silla después de un traslado
- Proporciona un excelente soporte para la cabeza y columna

TAMAÑOS: XS, S

TEJIDOS: Poliéster en red



ARNÉS TEDDY HIGIENE./ARNÉS LIKO HIGIENE. DE LIKO., MOD. 41 EL ARNÉS TEDDY HIGIENE DE SEGURIDAD. MOD. 46

Desarrollamos estos arneses para traslados desde y hacia el aseo, pero también son adecuados para otras situaciones de elevación. El mod. 41 está equipado con un cinturón, el mod. 46 tiene un cinturón de seguridad SafetyBelt. y soporte extra de la espalda para mayor comodidad. Ambos modelos tienen un relleno suave debajo de los brazos y soportes para piernas reforzados.

MOD. 41: TAMAÑOS: XS

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños), poliéster

MOD. 46: TAMAÑOS: XS

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños)



CHALECO TEDDY HIGIENE/CHALECO LIKO HIGIENE. DE LIKO., MOD. 50 CHALECO TEDDY HIGIENE DE ALTO./CHALECO LIKO HIGIENE ALTO. DE LIKO., MOD. 55

Desarrollamos estos arneses para traslados desde y hacia el aseo, pero también se pueden utilizar para otras situaciones de elevación donde se desea una posición vertical y totalmente sentado. El chaleco se eleva alrededor de la parte superior del cuerpo, lo que evita la tendencia de los niños al colapso. Los niños con problemas de espasticidad suelen sentarse bien en el mod. 55.

- Soportes para piernas reforzados
- El modelo 55 presenta un soporte de cabeza

MOD. 50: TAMAÑOS: XXS, XS

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños), poliéster (sólo XS)

MOD. 55: TAMAÑOS: XXS, XS

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños), poliéster



CHALECO TEDDY TEDDYVEST./CHALECO MASTERVEST. DE LIKO., MOD. 60 CHALECO TEDDY TEDDYVEST. CON CIERRE DELANTERO MOD. 64

Estos modelos se adaptan al niño y se elevan alrededor de la parte superior del cuerpo lo suficiente como para permitir que el niño se mantenga de pie por sus propios medios.

- El modelo 64 está equipado con hebilla de seguridad SafetyBuckle en la parte frontal para un ajuste ancho.
- El arnés inguinal y el estuche acolchado para cinta de hombro (imagen) son accesorios.

MOD. 60: TAMAÑOS: XXS, XS

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños), poliéster (sólo XS)

MOD. 64: TAMAÑOS: XS

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños)



LOS PANTALONES DE OSITOS TEDDYPANTS. MOD. 92

Los Arnese Teddy Pantalón con tejido de ositos logran que los ejercicios de elevación sean un placer en condiciones seguras.

Con los ajustes regulables en la cintura, el niño logra un buen soporte en el torso.

- Acolchados con piel de carnero sintética en el estómago y en la entrepierna

TAMAÑOS: XS

TEJIDO: Poliéster con diseños de ositos (para niños)



CHALECO TEDDY ESPECIAL BIPEDESTACIÓN STANDINGSHELL. CHALECO ESPECIAL BIPEDESTACIÓN STANDINGSHELL. DE LIKO., MOD. 67

Hemos creado el chaleco especial bipedestación para las elevaciones difíciles de los niños en una estructura de bipedestación del suelo a una posición de bipedestación. La grúa recoge todo el peso, y el niño se levanta de forma segura, con un soporte cómodo de todo el cuerpo y la cabeza.

- Soporte de cabeza y arnés inguinal acolchado incluidos.

TAMAÑOS: XXS, XS, S

TEJIDOS: Poliéster con diseños de ositos (para niños), poliéster (sólo S)



Ejercicios erguido/marcha/bipedestación de Liko™

Levantarse y caminar con libertad de movimientos.

Nuestros accesorios de elevación para ejercicios erguido/marcha/bipedestación le permiten alcanzar los objetivos que a menudo son difíciles de compaginar, como por ejemplo dar entrenamiento físico al paciente sin que el cuidador y el personal de enfermería se arriesguen a lesiones por el esfuerzo.

Durante el traslado o el entrenamiento, la grúa carga todo el peso, de esta manera, el paciente y el cuidador pueden dedicarse a la tarea sin tener que preocuparse por las consecuencias de un paso erróneo.



Sabías...

... que nuestros *amortiguadores para ejercicios de salto/movilidad* permiten caminar "a saltos" y se utilizan en combinación con el arnés Liko Pantalón de Liko. o el chaleco Liko Master de Liko. Los amortiguadores estimulan y divierten al paciente.

Ejercicios erguido/marcha/bipedestación de Liko™

SOPORTE DE AMBULACIÓN PARA EL CHALECO LIKO MASTER. DE LIKO. MOD. 60, 64

El chaleco facilita la elevación de posición sentada a de pie de los pacientes capaces de soportar su propio peso una vez están de pie. El soporte de ambulación para el chaleco Master. es una buena ayuda para realizar ejercicios en bipedestación, movilidad y equilibrio. Al trasladar de o hacia el aseo, la parte inferior del cuerpo queda libre para vestir y desvestirse. Soporte de ambulación para el chaleco Liko Master. de Liko. con cierre delantero, mod. 64, permite al paciente abrocharse o desabrocharse el chaleco por sí mismo. El arnés inguinal está disponible como accesorio en varios tamaños para adultos y niños.

Mod. 60:

- Para pacientes que pueden apoyar el peso sobre sus piernas
- Seguro y sin riesgos para elevaciones y ejercicios de bipedestación, movilidad y equilibrio
- Permite un patrón de movimiento natural al realizar elevaciones
- Excelente para transferencias por higiene, la parte inferior del cuerpo libre
- Puede usarse junto con el arnés para piernas

TAMAÑOS: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL*

TEJIDOS: Poliéster, red recubierta de plástico, poliéster (sólo S, M), poliéster tricotado con motivos de ositos (para niños)

Mod. 64:

- Mismas áreas de aplicación que el mod. 60
- Con cierre delantero
- Regulable en la parte delantera para el pecho y estómago
- Para pacientes independientes
- Puede usarse junto con el arnés para piernas

TAMAÑOS: XS, S, M, L, XL, XXL

TEJIDOS: Poliéster, poliéster en red (sólo M), poliéster tricotado con motivos de ositos (para niños)



SOPORTE DE AMBULACIÓN LIFTPANTS. DE LIKO. MOD. 92

Con el soporte de ambulación para el arnés Liko Pantalón de Liko. el paciente puede realizar ejercicios de movilidad en condiciones seguras. El soporte de ambulación para el arnés Pantalón proporciona libertad de movimiento aliviando así toda o parte de la carga del peso corporal. Soporta de forma segura, permitiendo que el paciente se pueda mover por sí mismo sin riesgo de caerse.

- Alivia la carga del peso corporal durante la práctica de ejercicios de bipedestación y movilidad
- Ayuda al paciente con movilidad limitada de las piernas para "andar"
- Permite una gran movilidad en la sala
- El arnés Pantalón está disponible en varios tamaños. Todos los tamaños, excepto el XS, están fabricados en poliéster en red con un accesorio acolchado para aliviar la presión en la zona de la entepierna. Una persona de mucho peso puede necesitar una talla más grande que una persona delgada de la misma altura.

TAMAÑOS: XS, S, M, L, XL*

TEJIDOS: Poliéster en red, poliéster con diseños de ositos (para niños)



CHALECO ESPECIAL BIPEDESTACIÓN STANDINGSHELL. DE LIKO. MOD. 67

Una estructura de bipedestación es ideal como accesorio para niños y jóvenes con discapacidades. Sin embargo, el soporte para la posición de bipedestación y la elevación de un niño en ella puede ser muy extenuante para el cuidador. Pero con los accesorios de elevación adecuados, estos problemas pueden evitarse.

- Permite la participación del paciente
- Eleva a un paciente con una estructura de bipedestación de una posición horizontal a erguida
- Una ayuda valiosa para la rehabilitación de niños a jóvenes
- Arnés inguinal incluido
- No colocar peso en la estructura de bipedestación

TAMAÑOS: XXS, XS, S, M, L

TEJIDOS: Poliéster (sólo S, M, L), poliéster tricotado con motivos de ositos (para niños, sólo XXS, XS, S)



Traslados en bipedestación con la grúa Sabina™.

La grúa Sabina™ es una grúa de bipedestación, fácil de usar, versátil destinada a pacientes capaces de participar activamente en procedimientos de elevación. Una vez que los pacientes están de pie, se les puede trasladar a una silla de ruedas o al baño, lo que les proporciona **una práctica de bipedestación en relación al traslado.**

La elevación se realiza con ayuda de un chaleco de soporte que eleva la parte superior del cuerpo del paciente. Hay disponibles varios tipos diferentes de chalecos de soporte para satisfacer las necesidades de los distintos pacientes.

Por ejemplo, el chaleco se puede colocar por debajo o rodeando a los brazos del paciente. La grúa Sabina™ tiene una gama amplia de diferentes modelos de chalecos y accesorios.



AYUDA DE BIPEDESTACIÓN DEL CHALECO LIKO BIPEDESTACIÓN SUPPORTVEST™ DE LIKO™ MOD. 91 EL MÁS VENDIDO

La ayuda de bipedestación del chaleco Liko Bipedestación SupportVest™ de Liko™ es un cómodo chaleco de bipedestación fácil de usar que solo necesita un pequeño ajuste individual. Se usa para los pacientes que necesitan mucha ayuda para elevarse por sí mismos, pero que pueden ponerse de pie firmemente con sus piernas. Se encaja en la espalda y debajo de los brazos. La ayuda de bipedestación del chaleco Liko Bipedestación SupportVest™ se puede utilizar con o sin el relleno de borreguito, el interior del chaleco está revestido en pana y evita el desplazamiento. Tiene relleno borreguito unido mediante cremalleras. Existe disponible un relleno extra como accesorio. Se une alrededor del cuerpo con un cinturón a la cintura, que sirve para mantener el chaleco en su lugar durante su uso. Este modelo es un excelente chaleco de bipedestación para comenzar.

- Va sujeto alrededor del cuerpo con un cinturón
- Cómodo con acolchado desmontable
- Cinturón ajustable
- Para utilizar junto con la percha 350 Sabina™
- Adecuado para pacientes más estables
- Extensión de cinturón y acolchado extra disponibles como accesorios

TAMAÑOS: S, M, L, XL
TEJIDOS: Poliéster, forrado con pana



AYUDA DE BIPEDESTACIÓN DEL CHALECO LIKO SEGURIDAD SAFETYVEST™ DE LIKO™ MOD. 93

AYUDA DE BIPEDESTACIÓN DEL CHALECO LIKO SEGURIDAD SAFETYVES™ DE LIKO™ CON SOPORTE DE ESPALDA EXTRA™ MOD. 94

El chaleco Liko Seguridad SafetyVest™ es un chaleco de bipedestación que es único tanto en seguridad como en forma y función. Se eleva por detrás de la columna y alrededor del torso. El cinturón contribuye a la seguridad evitando el riesgo de que los pacientes se deslicen. El principio de seguridad en los dispositivos de ajuste del chaleco significa que se combinamos dos lazadas en bucle en cada gancho. (Igual que en el soporte de ambulación para el chaleco Master™, chaleco Higiene™ y el arnés Terapia e Higiene™, mod. 45/46). El chaleco Seguridad™ de ayuda a la Bipedestación está fabricado en red recubierta de plástico, lo que proporciona un alto grado de fricción y evita eficazmente los deslizamientos. El chaleco Seguridad™ de ayuda a la bipedestación con soporte extra de la espalda, mod. 94 tiene un soporte de columna más grande y un borde inferior menor, por lo que distribuye la presión más suavemente a lo largo de un área mayor de la espalda. Adecuado para pacientes con estabilidad deficiente, que tienen dificultades para ponerse de pie.

- Para ofrecer seguridad extra
- Adecuado para el paciente con equilibrio en bipedestación deficiente
- Destinado principalmente para su uso con a percha 350 Sabina™
- Ajuste individual
- El mod. 94 proporciona soporte extra detrás de la espalda
- El relleno con piel está disponible como accesorio

TAMAÑOS: M, L
TEJIDOS: Poliéster, acolchado de piel con red recubierta de plástico.



AYUDA DE BIPEDESTACIÓN CON EL CHALECO LIKO CONFORT COMFORTVEST™ DE LIKO™ MOD. 95

La ayuda de bipedestación del chaleco Liko Confort ComfortVest™ de Liko™ difiere en un modo principalmente decisivo de otros chalecos de bipedestación. Está formado por dos partes, el chaleco exterior eleva por detrás de la espalda y por la parte posterior de los brazos y el cinturón interior, está unido al borde inferior del chaleco exterior, evitando deslizamientos y por lo tanto contribuye a aumentar la seguridad. El principio de seguridad en los dispositivos de ajuste del chaleco significa que combinamos dos lazadas en bucle que interactúan en cada gancho (igual que en el soporte de ambulación para el chaleco Master MasterVest™, ayuda de bipedestación del chaleco Seguridad SafetyVest™ el chaleco higiene™ y el arnés higiene™, mod. 45/46). No se crea ningún tipo de presión en las axilas, lo que hace que este chaleco sea ideal para pacientes con sensibilidad aguda y con derrame cerebral.

- Adecuado para pacientes con dificultad para ponerse en pie
- Para evitar la presión en la axilas, por ejemplo, para pacientes con derrame cerebral y con sensibilidad aguda
- Eleva por detrás de la espalda y por fuera de los brazos, no por debajo de los brazos.
- El cinturón eleva por el torso y evita el deslizamiento
- Ajuste individual
- Para utilizar junto con la percha Confort Sabina™

TAMAÑOS: S, M, L, XL
TEJIDOS: Poliéster, acolchado de piel con red recubierta de plástico.



AYUDA DE BIPEDESTACIÓN CON CHALECO SOLO SUPPORTVEST™ DE LIKO™ MOD 911

La ayuda de bipedestación del chaleco Solo SupportVest™ se utiliza cuando es necesario un arnés de uso a corto plazo para pacientes individuales o cuando quiere evitar el lavado. Se utiliza junto con la grúa de bipedestación Sabina™ de Liko™ para elevar a un paciente de una posición de sentado a una de bipedestación. La ayuda de bipedestación del chaleco Solo SupportVest™ eleva por detrás de la espalda y por la parte inferior de los brazos.

- Destinada para uso a corto plazo con pacientes individuales desde una posición de sentado a una de bipedestación
- No debe lavarse, desechar cuando esté sucio o se finalice su uso
- Para utilizar junto con la percha 350 Sabina™

TAMAÑOS: M, L
TEJIDOS: Material no tejido





Simplifica la aplicación del arnés.

Las series Handy son una **ayuda manual que facilita las colocaciones y traslados con arnés** al reducir la fricción entre el paciente y la superficie subyacente. Se pueden utilizar para pacientes de peso normal o bariátricos. Las ayudas al deslizamiento de las series Handy están fabricadas en un material de alta calidad, de baja fricción con buena capacidad de deslizamiento. La ayuda para la colocación HandySheet™ se usa principalmente para facilitar la colocación de un arnés en una posición de sentado u horizontal. Es una ayuda excelente para colocar un arnés, especialmente en pacientes con mucho sobrepeso, pacientes sensibles al dolor o pacientes con contracturas. Algunas de las ventajas únicas son los bolsillos en la ayuda de aplicación HandySheet corta que facilita la aplicación, por ejemplo, en las sillas de ruedas estrechas, y los lazos en la versión larga de la ayuda de aplicación HandySheet para facilitar la unión con la cabecera de la cama. Ambas soluciones son únicas de la serie Handy y son diseños registrados de Liko..



AYUDA DE APLICACIÓN HANDYSHEET™ DE LIKO™

Disponible en dos versiones, corta y larga. El modelo largo está equipado con asas. La ayuda de aplicación HandySheet™ se entrega y utiliza en pares.

- Material de alta calidad, con una fricción muy baja incluso después de muchos lavados.
- Las versiones largas de HandySheet™ presentan lazos en el extremo superior que facilitan el ajuste en la cama, por lo tanto, se reduce la necesidad de cuidadores que deban sostenerlo.
- La ayuda de aplicación HandySheet™ corta presenta pequeños bolsillos que facilitan la aplicación en, por ejemplo, una silla de ruedas estrecha.
- Hemos desarrollado métodos de trabajo únicos que facilitan la aplicación de las sábanas deslizantes y que son asimismo cómodos para el paciente. Con nuestro método, no es necesario girar al paciente en la cama para colocar la sábana deslizante.

Otros accesorios de las series Handy.

AYUDA DE COLOCACIÓN HANDYTUBE™ DE LIKO™ SOPORTE PARA HANDYBELT™ DE LIKO™

Puede leer más sobre estos productos en nuestra página web www.liko.com



Ayuda de colocación para la sábana de movilización RepoSheet™ de Liko™

Subir y girar en la cama.

Elevar y volver a colocar pacientes que terminaron mal colocados en la cama es un **procedimiento común que se realiza alrededor de la cama**. Las investigaciones han demostrado que muchas lesiones laborales ocurren mientras se reposiciona al paciente¹. La ayuda de reposicionamiento RepoSheet™ de Liko™ es una excelente ayuda para mover al paciente en la cama y durante los giros en camas. El accesorio de la sábana de movilización RepoSheet™ de Liko™ se coloca por debajo del paciente y puede utilizarse junto con y en lugar de una sábana normal durante todo el periodo de cuidado sanitario. (la versión desechable Solo RepoSheet™ de Liko™ se utiliza siempre junto con una sábana ordinaria).



AYUDA DE COLOCACIÓN ORIGINAL PARA LA SÁBANA DE MOVILIZACIÓN REPOSHEET™ DE LIKO™

Desarrollada por Liko™ especialmente para facilitar la colocación de un paciente más arriba en la cama y girarlo en la cama con una grúa. Carga mínima para el cuidador. Se puede utilizar junto con o en vez de las sábanas. No necesita participación por parte del paciente. Para su uso en pacientes que no pueden participar activamente en la recolocación en la cama, o son muy pesados para que el cuidador lo recoloque.

Regular para elevaciones de hasta 440 libras **Tejidos:** 50% algodón, 50% poliéster, red de poliéster
Ultra para elevaciones de hasta 1100 libras **Tejidos:** 50% algodón, 50% poliéster, red de poliéster

Otro: funciona mejor junto con una grúa de techo. La colocación antes de su primer uso se realiza más fácilmente elevando al paciente en un arnés. Después, se puede cambiar la ayuda de colocación por la sábana de movilización girando con la ayuda de la misma ayuda de colocación para la sábana de movilización.



AYUDA AL REPOSICIONAMIENTO DESECHABLE SOLO REPOSHEET™ DE LIKO™

La ayuda al reposicionamiento desechable Solo RepoSheet™ sirve para un uso a corto plazo de un único paciente. Se debe desechar cuando no esté limpia o cuando el paciente ya no la necesite. Disponible en dos versiones (consultar a continuación).

- Subir en la cama y girar en la cama
- Para uso a corto plazo por un sólo paciente
- Tejido: 50% algodón, 50% poliéster
- Disponible en dos versiones: Corta y amplia
- No lavar. Desechar cuando esté sucio o cuando el paciente ya no lo necesite

DESECHABLE SOLO REPOSHEET™ ESTÁ DISPONIBLE EN DOS TAMAÑOS:

Desechable Solo RepoSheet™ de Liko™ corta

Carga máxima: 440 libras
 Función: Usada normalmente para 2-3 movilizaciones en la cama.

Desechable Solo RepoSheet™ de Liko™ amplia

Carga máxima: 660 libras
 Cubre una parte mayor de la cama.
 Función: Usada normalmente para 4-5 movilizaciones en la cama.

Cinta MultiStrap™ de Liko™

Para múltiples usos en el cuidado sanitario.

El accesorio de elevación MultiStrap™ de Liko™ complementa las ayudas de elevación y reposicionamiento en una amplia gama de Liko. Los accesorios MultiStrap se han desarrollado para cumplir una variedad de necesidades en el cuidado sanitario y se pueden utilizar para **sostener los brazos, piernas y demás partes del cuerpo, por ejemplo, durante un tratamiento o un lavado**. Junto con una grúa para pacientes, los accesorios MultiStrap facilitan muchas tareas de elevación difíciles como el cuidado de heridas (por ejemplo, lesiones por quemaduras), procedimientos de higiene, tratamientos (por ejemplo, lesiones por colocación de catéteres o vendajes), exploraciones, colocación de cuñas y vestido / desvestido. Los accesorios MultiStrap también se pueden utilizar para colocar de lado a un paciente. Pueden utilizarse en forma individual o en pares. Para realizar giros en la cama, recomendamos el uso en pares con uno de los modelos más anchos.



ACCESORIO MULTISTRAP™ DE LIKO™

MultiStrap™ de Liko™ es lavable y está fabricado en un tejido de poliéster fuerte y duradero.

MultiStrap™ de Liko™ estándar Anchura 3.9 pulgadas
MultiStrap™ de Liko™ Ancha Anchura 9.8 pulgadas
MultiStrap™ de Liko™ ultra Anchura 15.7 pulgadas

Con todas las cintas MultiStrap™ de Liko™ lavables, se incluye una Cinta fija de 53 pulgadas que se utiliza para fijar un extremo del accesorio MultiStrap a la cama cuando se gira un paciente.



ACCESORIO MULTISTRAP DESECHABLE™ LIKO™

Los accesorios MultiStrap Desechable™ sirven para un corto plazo para un único paciente o para evitar lavar.

MultiStrap Desechable™ estrecha Anchura 2.0 pulgadas
MultiStrap Desechable™ estándar Anchura 3.9 pulgadas
MultiStrap Desechable™ amplia Anchura 9.8 pulgadas

Todos los accesorios MultiStrap™ tienen una carga máx. de 440 libras.

Sabías...

- Ese accesorio MultiStrap™ facilita la elevación y contención de, por ejemplo, brazos y piernas durante tratamientos y lavados
- Que hay tres accesorios MultiStrap™ en diferentes tamaños
- Que los accesorios MultiStrap™ están también disponibles en tejido destinado a un uso a corto plazo por un único paciente

¹ Engkvist I-L, Back injuries among nurses - A comparison of the accident process after a 10-year follow-up. Safety Sci, 2007, www.sciencedirect.com



Perchas para muchos tipos de grúas.

Un arnés siempre funciona mejor con una percha cuidadosamente seleccionada. **Juntos, el arnés y la percha forman una unidad funcional.** Desde el punto de vista de la seguridad, la percha es muy importante. Las guías de instrucciones de los arneses incluyen recomendaciones para realizar la mejor elección de percha. Habitualmente, es posible que varios modelos sean apropiados. El diseño y la geometría de la percha determinan la postura de sentado del paciente. Generalmente, una barra simétrica proporciona un ángulo mayor para la cadera y una postura de sentado más reclinada que una barra doble.

Una percha grande indica que el paciente mantiene los brazos dentro del arnés y tiene más espacio para la parte superior del cuerpo. Una percha más estrecha se ciñe más al paciente, que normalmente deja los brazos fuera del arnés.

Un denominador común para todas nuestras perchas es que vienen equipadas con **pestillos para la percha**. Muchas de las nuevas perchas están disponibles con cambios rápidos de fábrica para la conexión más rápida y fácil a las básculas o para el cambio de perchas.

Sabías...

... que no es una coincidencia que la mayoría de nuestras grúas y arneses para los pacientes están fabricadas en aluminio resistente. Dado que, en principio, el aluminio se puede reciclar un número ilimitado de veces, lo llamamos el “*metal ecológico*”.



LA PERCHA.. UNIVERSAL 450 DE LIKO™

Tiene una carga máx. de 660 libras

La Universal 450 es la percha apropiada para la mayoría de los casos y para la mayoría de los arneses. Es la percha que se instala en la mayoría de las grúas que se entregan (no aplicable a la Viking XL).



LA PERCHA.. UNIVERSAL 350 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 660 libras

La Universal 350 es diez centímetros más corta que la Universal.. 450 y se utiliza habitualmente para elevar niños. En el caso de los adultos que utilizan un arnés de talla para adultos junto con la Universal 350, los brazos del paciente se encuentran por fuera del arnés.



LA PERCHA.. UNIVERSAL 600 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 660 libras

La Universal 600 permite que haya suficiente espacio para la parte superior del cuerpo y está principalmente diseñada para su uso con el arnés Confort Plus.. mod. 300/310 y 350/360. O bien, con los arneses para superponer los soportes para piernas, es decir, cuando los dos soportes para piernas se colocan paralelamente por debajo de los muslos del paciente, por ejemplo, cuando se utiliza un Arnés Amputados.. mod. 70/75.



LA PERCHA DOBLE.. UNIVERSAL 670 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 660 libras

La Percha Doble.. Universal 670 es un modelo apropiado para adultos de gran talla y para los pacientes que desean aliviar la presión sobre sus hombros. La Percha Doble.. 670 está diseñada para su uso con los arneses con soportes para piernas “cruzados”. Es decir, el Arnés Original Soft Alto.. mod. 26 o Arnés Universal.. Mod. 00. La carga se debe aplicar sobre los cuatro ganchos en cada elevación.



LA PERCHA MINI.. UNIVERSAL 220 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 450 libras

La Percha Mini.. 220 es una percha especialmente pequeña que ha sido desarrollada principalmente para los pacientes que prefieren sentarse cómodamente en su arnés. Habitualmente, la razón es que el arnés debe estar lo más ajustado posible hasta que esté bien seguro.



LA PERCHA CRUZADA 450 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 660 libras

La Percha Cruzada 450 es una percha simétrica más pequeña que permite una postura de sentado reclinada. La Percha Cruzada 450 es adecuada para su uso con los arneses de respaldo alto o soporte de cabeza. Es simétrica y además se recomienda para su uso con tamaños de arneses pequeños. Es excelente junto con el arnés Silueta.. mod. 22 y el arnés Soft Original Alto.. mod. 26 en tamaño medio y pequeño. El soporte de ambulación para el pantalón de elevación LiftPants.. mod. 92 funciona bien junto con la percha cruzada 450.



LA PERCHA CRUZADA 670 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 660 libras

La Percha Cruzada 670 es una percha con suspensión simétrica. Es ancha en los hombros y proporciona una postura de sentado cómoda y reclinada. La Percha Cruzada 670 funciona bien con los arneses de respaldo alto o soporte de cabeza. Por ejemplo, el Arnés Universal.. mod. 00, el arnés Soft Original Alto.. mod. 26, ambos modelos en talla mediana o más grande, y el arnés confort plus.. mod. 300/310 y el arnés alto confort plus.. mod. 350/360, en todos los tamaños. El arnés alto confort plus.. mod. 350/360 junto con la percha cruzada 670 es una excelente solución para pacientes que han sido sometidos a una cirugía de cadera o para las personas con limitaciones para moverse a la altura de las caderas.



LA PERCHA LATERAL UNIVERSAL.. 450 DE LIKO..

Tiene una carga máx. de 660 libras

Las Perchas laterales Universal.. son una alternativa a las barras cruzadas de Liko para lograr una suspensión simétrica. Las Perchas laterales se sujetan y se desconectan fácilmente de una Percha Universal.. Una vez cargadas, las Perchas laterales se adaptan al arnés, lo que habitualmente indica que se suspenden diagonalmente, proporcionando de esta manera más espacio para los hombros del paciente. En combinación con el arnés alto confort plus.. mod. 350/360, las Perchas laterales son una alternativa excelente para los pacientes que han sido sometidos a una cirugía de cadera o para las personas con limitaciones para moverse a la altura de las caderas. Las Perchas laterales Universal se entregan junto con una bolsa de almacenamiento que se puede colgar de una pared o de una grúa móvil.

Accesorios de elevación inteligente para una adaptación total.


Como ya hemos mencionado, normalmente decimos “el arnés es la mitad de la grúa”. Durante las tres décadas en las que hemos desarrollado grúas y accesorios de elevación hemos notado muchas necesidades diferentes. Para satisfacer estas necesidades, hemos complementado nuestra amplia gama con muchos accesorios inteligentes.

Una herramienta única en Internet.

En nuestra página web encontrará nuestra guía inteligente de arneses, donde podrá recibir asistencia a la hora de encontrar un arnés adecuado para las necesidades de elevación de su organización o para un paciente concreto. Encontrará información sobre el estado de su paciente y la situación de elevación actual, y se muestran modelos de arneses recomendados. Obviamente, esta guía no reemplaza una selección individual, lo que siempre se recomienda.

Encuentre su arnés.

En nuestra guía le ayudamos a encontrar un arnés adecuado para las necesidades de elevación de su organización o para un paciente concreto. Recuerde, cuanto más información nos facilite, mejor será el resultado. Cuando los resultados aparezcan en el lado derecho, podrá hacer clic para leer más sobre el modelo en concreto.

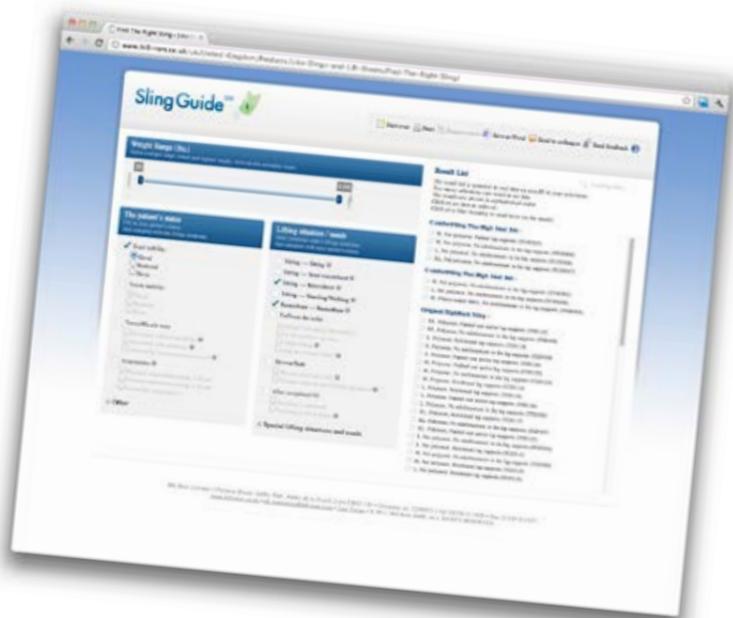

Cintas Liko™

Las cintas están destinadas a transferencias cortas junto con una grúa de techo cuando la elevación se puede planificar para evitar así una elevación desde el suelo.

Es importante realizar un ajuste individual exhaustivo antes de su uso, para asegurar que el paciente puede manejar la situación de elevación y se eleva de una manera satisfactoria en lo que respecta a la seguridad.



Arnés Inguinal para el chaleco Master™

El arnés inguinal se utiliza habitualmente junto con el soporte de ambulación chaleco Master. de Liko. para realizar ejercicios de movilidad. El arnés inguinal evita que el soporte de ambulación chaleco Master. se deslice de la parte superior del cuerpo.



Fundas protectoras acolchadas para soporte de piernas

Las fundas protectoras acolchadas que alivian la presión están disponibles como accesorios y se pueden adquirir para todos nuestros arneses. Están hechos en borreguito sintético en un lado y el tejido del arnés en el otro.



Funda acolchada para cinta de hombro

Las fundas protectoras acolchadas para el alivio de la presión están disponibles como accesorios para la instalación en las cintas de hombro delanteras. Están equipadas con Velcro a lo largo de un lado para una aplicación fácil.



Clips de lazo

Para minimizar la conexión incorrecta, existen disponibles clips de lazo como accesorios para indicar aquellos lazos a ajustar para ciertas personas. Esto ayuda al cuidador a la hora de seleccionar el lazo correcto a conectar a la percha.



Báscula Liko

La báscula Liko es una práctica báscula para pesar pacientes durante la elevación. Después de su ajuste, el peso se visualiza en kilogramos o libras.



El Soporte de cabeza

El soporte de cabeza es un accesorio de elevación para sujetar la cabeza del paciente. Se usa en conjunto con uno de los arneses de Liko, cuando el arnés no proporciona ningún soporte para la cabeza. El soporte de cabeza está fabricado con poliéster.



Lazos de extensión

Los lazos de extensión de Liko están diseñados para un ajuste sencillo a la gama de accesorios de Liko. Se sujetan a los lazos de la cinta y a las cintas de lazo para permitir el ajuste de longitud según sea necesario. Los lazos de extensión están disponibles en dos longitudes diferentes de 5 pulgadas y 9 pulgadas de extensión, respectivamente.



Cubierta Solo para los pantalones de elevación Ultra™

La cubierta Solo es un accesorio desechable para los pantalones de elevación Ultra™. La cubierta se coloca los pantalones de elevación para protegerlos de la suciedad.

Especialistas en elevaciones y transferencias.

Somos especialistas en elevar y transportar a personas de forma segura y cuidadosa. Hemos utilizado nuestro liderazgo en conocimiento, tecnología y metodología para crear una gama completa de grúas, arneses y accesorios para pacientes. Hemos analizado sus necesidades y ofrecido la solución que cumple sus necesidades específicas. Además, siempre ofrecemos formación y una cooperación continuada para proporcionar al personal y a los pacientes un entorno seguro para elevaciones y transferencias. Combinadas con otras soluciones de la amplia gama de productos de Hill-Rom, podemos proporcionar soluciones completas de habitaciones para hospitales y otras instalaciones de cuidado en todo el mundo.

También podemos ofrecer arneses en otros tejidos y diseños, así como arneses adaptados a pacientes con necesidades especiales.

Póngase en contacto con nosotros para mayor información.

En nuestras páginas web www.hill-rom.com y www.liko.com encontrará nuestra información de contacto y más información sobre nosotros y nuestros productos.

Todas las marcas comerciales de este folleto o marcas comerciales registradas pertenecen a Liko R&D, Hill-Rom Liko AB o Hill-Rom Services, Inc.



Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan...

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
Deutschland _____ 0800 8 63 55 37
Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
Italia _____ + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) _____ 0800 8 63 55 37

Österreich _____ 0800 8 63 55 37
Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
Iberia _____ +34 (0)93 6856000
Nordic Countries _____ +46 (0)20 78 10 30
Export _____ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.

© 2013 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.